

	<b>CERRAHİ ASPIRATÖR KULLANIM TALİMATI</b>	Doküman No	AML.TL.15
		Yayın Tarihi	01.07.2009
		Rev. No	00
		Rev. Tarihi	-
		Sayfa No	1/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

### 1.AMAÇ

Bu talimatın amacı, cerrahi birimlerde kullanılan aspiratörün kullanımının maksimum düzeyde yararlı ve güvenli olarak kullanılmasını sağlamaktır.

### 2.KAPSAM

Aspiratör cihazının amaca uygun işlem yapabilmesi için açılması, kullanılması ve kapatılması ile ilgili işlem basamaklarını, Ameliyathane sorumlu hemşiresi, ilgili anestezi uzmanı, anestezi teknisyeni ve ameliyathane yardımcı personelleri kapsar.

### 3.TANIMLAR

Özel bir tanımı yoktur.

### 4.UYGULAMA

4.1.Aspiratör cihazını kullanıma hazır hale getirmek için her kullanımdan önce sırasıyla aşağıdaki kontrolleri yapınız.

4.2.Toplama kavanozunun, mahfaza üzerindeki özel bariyerli bölüme tam olarak yerleştirilmiş olduğunu kontrol ediniz.

4.3.Toplama kavanozu ağzında kırık, çatlak vb. hava kaçağına neden olabilecek sorunların olmadığını kontrol ediniz.

4.4.Kavanoz kapağının kavanozu tam olarak kapatmış olduğunu kontrol ediniz.

4.5.Aspirasyon hortumunda herhangi bir aşınma delik vb. hava kaçağına neden olabilecek sorunların olmadığını kontrol ediniz.

4.6.Aspirasyon hortumunun bir ucunu kavanoz kapağı üzerindeki vakum konektörüne takınız.

4.7.Elektrik kablosunun bir ucunu, cihazın arkasındaki elektrik kablosu giriş soketine takınız.

4.8.Elektrik kablosunun diğer ucunu topraklı bir prize takınız.

4.9.Açma kapama anahtarını (0) konumundan (1) konumuna getirip, yeşil pilot lambanın yandığını gözleyiniz. Cihaz çalışmaya başlayacaktır.

4.10.Aspirasyon hortumunun çıkış ucunu elinizle kapatarak cihazın vakum yaptığını elinizle kontrol ediniz.

### 5. İLGİLİ DOKÜMANI

İlgili Dokümanı Yoktur.