

	CERRAHİ ASPİRATÖR CİHAZI SÖKME VE BOŞALTMA TALİMATI	Doküman No	AML.TL.16
		Yayın Tarihi	01.07.2009
		Rev. No	00
		Rev. Tarihi	-
		Sayfa No	1/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

1.AMAÇ

Cerrahi birimlerde kullanılan aspiratör cihazının sökme ve boşaltma işlemlerinin güvenli ve cihazdan maksimum ölçüde kullanılabilmesini sağlamaktır.

2.KAPSAM

Bu talimat aspiratör cihazının amaca uygun işlem yapabilmesi için gereken durumlarda sökme ve boşaltılmasıyla ilgili işlem basamaklarını, Ameliyathane Hemşireleri ve yardımcı personelleri kapsar

3.TANIMLAR

Özel bir tanımı yoktur.

4.UYGULAMA

4.1.Cihazın açma kapama nahtarını (1) konumundan (0) konumuna getiriniz.

4.2.Kavanoz kapağındaki vakum konektörüne takılı olan aspirasyon hortumunu çıkarınız.

4.3.Kavanozu açmak için kapak sıkma somununu saat yönü tersine çeviriniz. Kavanoz kapağı, bağlı bulunduğu yaylı sistem sayesinde kavanozdan kolayca ayrılacaktır.

4.4.Kavanozu cihaz üzerindeki yerinden dikkatlice alıp, klinik alanı dışında boşaltınız.

4.5.Boşaltılan kavanozun dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra, kavanozun ölçekli kısmı öne gelecek şekilde cihaz üzerindeki yuvasına dikkatlice yerleştiriniz.

4.6.Kavanozun kapağını kapatmak için kapak sıkma somununu avuç içi ile aşağıya doğru bastırarak, saat yönünde çeviriniz. Bu işlemler el kuvveti ile gerçekleştirilip, başka bir alet kesinlikle kullanmayınız.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

İlgili Dokümanı Yoktur.