

	<b>AMBU TEMİZLİĞİ TALİMATI</b>	Doküman No	AML.TL.19
		Yayın Tarihi	01.12.2009
		Rev. No	-
		Rev. Tarihi	00
		Sayfa No	1/1

Hazırlayan Başhemşire	İnceleyen Kalite Yönetim Direktörü	Onaylayan Başhekim
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------

### 1.AMAÇ

Çevre Hastanesi'nde kullanılmakta olan ambunun efektif kullanılabilirliğini sağlamak, hasta güvenliği çerçevesinde enfeksiyonu önlemek amacıyla temizliğini sağlamaktır.

### 2.KAPSAM

Bu talimat ambu temizliği sırasındaki işlem basamaklarını ve dikkat edilmesi gereken hususları, sorumlu hemşireleri ve yardımcı personelleri kapsar.

### 3.TANIMLAR

Özel bir tanımı yoktur.

### 4.UYGULAMA

#### 4.1.KULLANILAN CİHAZ / MALZEMELER

Ambu

4.2.Kullanım sonrası hemen dezenfekte edilmelidir.

4.3.15 dk.alet dezenfektanı veya **Dezenfektan Kullanım Planı**na göre dezenfekte edilmelidir.

4.4.Ambunun balonu suya batırılmamalı, üst kısımları dezenfekte edilmelidir.

4.5.Kullanılmadığı sürece ayda bir dezenfekte edilmelidir. Durulanıp kuru saklanmalıdır.

4.6.Etilen oksit ile steril edilebilir.

4.7.Bulaşıcı hastalık durumlarında disposable ambu kullanılır.

### 5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

ENF.PL.04 Dezenfektan Kullanım Planı