



LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

Dokuman No:	BIY.LS.03
Yayın Tarihi:	10.04.2010
Rev.No:	01
Rev.Tarihi:	20.09.2013
Sayfa No:	19/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Laboratuvar Sorumlusu	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

TEST ADI	NUMUNE	KABUL KRİTERLERİ					RED KRİTERLERİ
		NUMUNE KABI	NUMUNE MİKTARI	TAŞIMA	SAKLAMA	KAYIT	
AKŞ(Açlık Kan Şekeri)	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 Cde 1saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımılı Örnekler
OGTT(Tokluk)	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 1saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımılı Örnekler
OGTT(şeker yükleme testi)	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 1saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımılı Örnekler
OGTT(50 gr.tarama)testi	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 1saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımılı Örnekler
ÜRE/BUN	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımılı Örnekler



LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

Dokuman No:	BIY.LS.03
Yayın Tarihi:	10.04.2010
Rev.No:	01
Rev.Tarihi:	20.09.2013
Sayfa No:	19/2

TEST ADI	NUMUNE	KABUL KRİTERLERİ					RED KRİTERLERİ
		NUMUNE KABI	NUMUNE MİKTARI	TAŞIMA	SAKLAMA	KAYIT	
KREATİNİN	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 c de 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
ÜRİK ASİT	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
KOLESTEROL(TOTAL)	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
TRİGLİSERİD	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
HDL KOLESTEROL	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
LDL KOLESTEROL	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler



LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

Dokuman No:	BIY.LS.03
Yayın Tarihi:	10.04.2010
Rev.No:	01
Rev.Tarihi:	20.09.2013
Sayfa No:	19/3

TEST ADI	NUMUNE	KABUL KRİTERLERİ					RED KRİTERLERİ
		NUMUNE KABI	NUMUNE MİKTARI	TAŞIMA	SAKLAMA	KAYIT	
VLDL KOLESTEROL	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
ALBUMİN	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
TOTAL PROTEİN	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
GLOBÜLİN	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
SGPT(ALT)	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
SGOT(AST)	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler



LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

Dokuman No:	BIY.LS.03
Yayın Tarihi:	10.04.2010
Rev.No:	01
Rev.Tarihi:	20.09.2013
Sayfa No:	19/4

TEST ADI	NUMUNE	KABUL KRİTERLERİ					RED KRİTERLERİ
		NUMUNE KABI	NUMUNE MİKTARI	TAŞIMA	SAKLAMA	KAYIT	
ALP-ALKALEN FOSFATAZ	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık, Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
LDH	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
GGT(GAMMA-GT)	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
TOTAL BİLİRUBİN	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
DİREKT BİLİRUBİN	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
İNDİREKT BİLİRUBİN	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler



LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

Dokuman No:	BIY.LS.03
Yayın Tarihi:	10.04.2010
Rev.No:	01
Rev.Tarihi:	20.09.2013
Sayfa No:	19/5

TEST ADI	NUMUNE	KABUL KRİTERLERİ					RED KRİTERLERİ
		NUMUNE KABI	NUMUNE MİKTARI	TAŞIMA	SAKLAMA	KAYIT	
SODYUM(Na)	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
POTASYUM(K)	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
İYONİZE KALSİYUM	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
KALSİYUM(Ca)	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
DEMİR(serum)	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
DEMİR BAĞLAMA (UIBC)	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler



LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

Dokuman No:	BIY.LS.03
Yayın Tarihi:	10.04.2010
Rev.No:	01
Rev.Tarihi:	20.09.2013
Sayfa No:	19/6

TEST ADI	NUMUNE	KABUL KRİTERLERİ					RED KRİTERLERİ
		NUMUNE KABI	NUMUNE MİKTARI	TAŞIMA	SAKLAMA	KAYIT	
AMİLAZ	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımılı Örnekler
MAGNEZYUM	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımılı Örnekler
LİPİT (TOTAL)	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımılı Örnekler
FOSFOR(P)	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımılı Örnekler
CK	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımılı Örnekler
CK-MB(Kütle yönt.)	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımılı Örnekler



LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

Dokuman No:	BY.LS.03
Yayın Tarihi:	10.04.2010
Rev.No:	01
Rev.Tarihi:	20.09.2013
Sayfa No:	19/7

TEST ADI	NUMUNE	KABUL KRİTERLERİ					RED KRİTERLERİ
		NUMUNE KABI	NUMUNE MİKTARI	TAŞIMA	SAKLAMA	KAYIT	
ASO(Türbidimetrik)	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımı Örnekler
CRP(Türbidimetrik)	Serum	Sarı tüp	5cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımı Örnekler
RF (TÜRBİDİMETRİK)	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 Cde 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımı Örnekler
HbA1C(Glukohemoglobin)	Etdali tamkan	Mor tüp	2 CC	25 C de	4-8 Cde 2saat	HBYS	Pıhtılı,Hemolizli,Az veya Fazla Miktarda Alınmış ,Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımı Örnekler
Aptt	Sitratli tamkan	mavi tüp	2 cc	4 C de	4-8 c de 1saat	HBYS	Pıhtılı,Hemolizli,Az veya Fazla Miktarda Alınmış ,Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımı Örnekler
PT(PROTROMBİN ZAMANI)	Sitratli tamkan	mavi tüp	2 cc	4 C de	4-8 C de 1saat	HBYS	Pıhtılı,Hemolizli,Az veya Fazla Miktarda Alınmış ,Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımı Örnekler



LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

Dokuman No:	BIY.LS.03
Yayın Tarihi:	10.04.2010
Rev.No:	01
Rev.Tarihi:	20.09.2013
Sayfa No:	19/8

TEST ADI	NUMUNE	KABUL KRİTERLERİ					RED KRİTERLERİ
		NUMUNE KABI	NUMUNE MİKTARI	TAŞIMA	SAKLAMA	KAYIT	
KANAMA ZAMANI	Hasta başı	-	-	-	-	HBYS	Testin Uygulandığı Deride Bütünlük Bozulması,Enfeksiyon,ödem
PIHTILAŞMA ZAMANI	Hasta başı	-	-	-	-	HBYS	Testin Uygulandığı Deride Bütünlük Bozulması,Enfeksiyon,ödem
KREATİNİN KLİRENS	İdrar	Temiz 5 lt.kap	Miktarın Tamamı	25 C de Ka	4-8 c de 12saat	HBYS	Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Dışkı ile Karışmış ,Zaman Aşımılı İdrarin hatalı toplanması Asitlendirilmiş İdrar Örnek
ÜRE KLİRENSİ	İdrar	Temiz 5 lt.kap	Miktarın Tamamı	25 C de Ka	4-8 c de 12saat	HBYS	Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Dışkı ile Karışmış ,Zaman Aşımılı İdrarin hatalı toplanması Asitlendirilmiş İdrar Örnek
24 h LİK İDRARDA KREATİNİN	İdrar	Temiz 5 lt.kap	Miktarın Tamamı	25 C de Ka	4-8 c de 12saat	HBYS	Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Dışkı ile Karışmış ,Zaman Aşımılı İdrarin hatalı toplanması Asitlendirilmiş İdrar Örnek
KREATİNİ(SPOT İDRAR)	İdrar	İdrar kabı	5 cc	25 C de	4-8 c de 12saat	HBYS	Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımılı ve Yetersiz Örnek



LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

Dokuman No:	BIY.LS.03
Yayın Tarihi:	10.04.2010
Rev.No:	01
Rev.Tarihi:	20.09.2013
Sayfa No:	^19/9

TEST ADI	NUMUNE	KABUL KRİTERLERİ					RED KRİTERLERİ
		NUMUNE KABI	NUMUNE MİKTARI	TAŞIMA	SAKLAMA	KAYIT	
BOS (BEYİN OMURİLİK SIVISI)	BOS	Steril Tüp	0.5 cc	25 C de	4-8 c de 12saat	HBYS	Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli ve Yetersiz Örnek
HBs Ag Ultra(ELFA)	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 c de 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
BHCG(Beta-HCG)	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 c de 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
FSH	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 c de 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
PROLAKTİN	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 c de 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
E2 (ESTRADIÖL)	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 c de 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler



LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

Dokuman No:	BIY.LS.03
Yayın Tarihi:	10.04.2010
Rev.No:	01
Rev.Tarihi:	20.09.2013
Sayfa No:	19/10

TEST ADI	NUMUNE	KABUL KRİTERLERİ					RED KRİTERLERİ
		NUMUNE KABI	NUMUNE MİKTARI	TAŞIMA	SAKLAMA	KAYIT	
IgE (İmmünglobülin E)	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 c de 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımılı Örnekler
FT3 (Free T3)	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 c de 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımılı Örnekler
FT4(Free T4)	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 c de 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımılı Örnekler
TSH	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 c de 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımılı Örnekler
FERRİTİN(ELFA)	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 c de 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımılı Örnekler
PSA(Prostat Spesifik Antijen)	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 c de 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımılı Örnekler



LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

Dokuman No:	BIY.LS.03
Yayın Tarihi:	10.04.2010
Rev.No:	01
Rev.Tarihi:	20.09.2013
Sayfa No:	19/11

TEST ADI	NUMUNE	KABUL KRİTERLERİ					RED KRİTERLERİ
		NUMUNE KABI	NUMUNE MİKTARI	TAŞIMA	SAKLAMA	KAYIT	
Serbest PSA	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 c de 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
CA 125	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 c de 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
CA 19-9	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 c de 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
TAM KAN SAYIM(Hemogram)	Etdali tamkan	Mor tüp	2 cc	25 C de	4-8 c de 12saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
LÖKOSİT(Beyaz küre sayımı)	Etdali tamkan	Mor tüp	2 cc	25 C de	4-8 c de 12saat	HBYS	Hemolizli,Pıhtılı,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu ,Zaman Aşımli Az Veya Fazla alınmış Örnekler
LÖKSİT FORMÜL(Periferik yay)	Etdali tamkan	Mor tüp	2 cc	25 C de	4-8 c de 12 saat	HBYS	Hemolizli,Pıhtılı,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu ,Zaman Aşımli Az Veya Fazla alınmış Örnekler



LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

Dokuman No:	BIY.LS.03
Yayın Tarihi:	10.04.2010
Rev.No:	01
Rev.Tarihi:	20.09.2013
Sayfa No:	19/12

TEST ADI	NUMUNE	KABUL KRİTERLERİ					RED KRİTERLERİ
		NUMUNE KABI	NUMUNE MİKTARI	TAŞIMA	SAKLAMA	KAYIT	
COOMBS (DİREKT)	Etdali tamkan	Mor tüp	2 cc	25 C de	4-8 c de 12 saat	HBYS	Hemolizli,Kontamine Barkodsuz veya yanlış barkodlu,zaman aşımli örnekler
COOMBS (İNDİREK)	Serum	Sarı tüp	2 cc	25 C de	4-8 c de 12 saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
CROSS MATCHING	Etdali tamkan	Mor tüp	2 cc	25 C de	4-8 c de 12 saat	HBYS	Hemolizli,Kontamine Barkodsuz veya yanlış barkodlu,zaman aşımli örnekler
SEDİMANTASYON	Sitratli tamkan	Siyah Tüp	2 cc	25 C de	4-8 c de 12 saat	HBYS	Pıhtılı,Hemolizli,Az veya Fazla Miktarda Alınmış ,Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
HEMATOKRİT (HCT)	Heparin tamkan	kapiller	2 adet	25 C de	4-8 c de 12 saat	HBYS	Pıhtılı,Hemolizli,Az veya Fazla Miktarda Alınmış ,Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
KAN GRUBU	Etdali tamkan	Mor tüp	2 cc	25 C de	4-8 c de 12 saat	HBYS	Hemolizli,Kontamine Barkodsuz veya yanlış barkodlu,zaman aşımli örnekler



LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

Dokuman No:	BIY.LS.03
Yayın Tarihi:	10.04.2010
Rev.No:	01
Rev.Tarihi:	20.09.2013
Sayfa No:	19/13

TEST ADI	NUMUNE	KABUL KRİTERLERİ					RED KRİTERLERİ
		NUMUNE KABI	NUMUNE MİKTARI	TAŞIMA	SAKLAMA	KAYIT	
Trombosit	Etdali tamkan	Mor tüp	2 cc	25 C de	4-8 c de 12 saat	HBYS	Hemolizli,Kontamine Barkodsuz veya yanlış barkodlu,zaman aşımli örnekler
RETİKÜLOSİT	Etdali tamkan	Mor tüp	2 cc	25 C de	4-8 c de 12 saat	HBYS	Hemolizli,Kontamine Barkodsuz veya yanlış barkodlu,zaman aşımli örnekler
MAYİDE HÜCRE SAYIMI	Mayi	Steril Tüp	0.5 cc	25 C de	4-8 c de 12 saat	HBYS	Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli ve Yetersiz Örnek
PLANO(İDRAR)	idrar	İdrar kabı	0.5 cc	25 C de	4-8 c de 12 saat	HBYS	Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli ve Yetersiz Örnek
PLANO(SERUM)	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 c de 12 saat	HBYS	Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli ve Yetersiz Örnek
HBs Ag (card test)	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 c de 12 saat	HBYS	Hemolizli,Kontamine Barkodsuz veya yanlış barkodlu,zaman aşımli örnekler



LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

Dokuman No:	BIY.LS.03
Yayın Tarihi:	10.04.2010
Rev.No:	01
Rev.Tarihi:	20.09.2013
Sayfa No:	19/14

TEST ADI	NUMUNE	KABUL KRİTERLERİ					RED KRİTERLERİ
		NUMUNE KABI	NUMUNE MİKTARI	TAŞIMA	SAKLAMA	KAYIT	
ANTİ HCV (card test)	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 c de 12 saat	HBYS	Hemolizli,Kontamine Barkodsuz veya yanlış barkodlu,zaman aşımli örnekler
ANTİ HIV 1/2 (card test)	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 c de 12 saat	HBYS	Hemolizli,Kontamine Barkodsuz veya yanlış barkodlu,zaman aşımli örnekler
VDRL (card test)	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 c de 12 saat	HBYS	Hemolizli,Kontamine Barkodsuz veya yanlış barkodlu,zaman aşımli örnekler
ANTİ HBS(card test)	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 c de 12 saat	HBYS	Hemolizli,Kontamine Barkodsuz veya yanlış barkodlu,zaman aşımli örnekler
KAN GAZLARI	Heparin tam	Enjektör	1 cc	4 C de	Hemen	HBYS	Pıhtılı,Az veya Fazla Miktarda Alınmış,Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zamanlı Aşımli Örnekler
FKU+Ntsh	Heparin tam	FKU Kağıdı		25 C de	4-8 c de 72 saat	HBYS	Az veya Fazla Mikktarda Alınmış ,Barkodsuz veya yanlış barkodlu , Zaman Aşımli Örnekler



LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

Dokuman No:	BIY.LS.03
Yayın Tarihi:	10.04.2010
Rev.No:	01
Rev.Tarihi:	20.09.2013
Sayfa No:	19/15

TEST ADI	NUMUNE	KABUL KRİTERLERİ					RED KRİTERLERİ
		NUMUNE KABI	NUMUNE MİKTARI	TAŞIMA	SAKLAMA	KAYIT	
ROSE BENGAL	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 c de 12 saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
BRUCELLA Agl.(Wright-İmmunocapture)	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 c de 12 saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
GRUBEL WİDAL(SALM.TİFO)	Serum	Sarı tüp	5 cc	25 C de	4-8 c de 12 saat	HBYS	Hemolizli,Hiperlipemik,İkterik,Bulanık,Kontamine Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu,Zaman Aşımli Örnekler
TİT (TAM İDRAR TAHLİLİ)	İdrar	İdrar kabı	5 cc	25 C de	4-8 c de 2 saat	HBYS	Yetersiz ,uzun süre beklemiş örnek ,kontamine toplama kaybı (mens kanı)Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu
DANSİTE	İdrar	İdrar kabı	5 cc	25 C de	4-8 c de 2 saat	HBYS	Yetersiz ,uzun süre beklemiş örnek ,kontamine toplama kaybı (mens kanı)Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu
BOĞAZ KÜLTÜRÜ	Boğaz sürüntüsü	Steril Eküvyon çubuğu		4 C de	4-8 c de 2 saat	HBYS	Steril Olmayan Tüp ve Eküvyon Kullanımı,Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu ,Zaman Aşımli Örnek



LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

Dokuman No:	BIY.LS.03
Yayın Tarihi:	10.04.2010
Rev.No:	01
Rev.Tarihi:	20.09.2013
Sayfa No:	19/16

TEST ADI	NUMUNE	KABUL KRİTERLERİ					RED KRİTERLERİ
		NUMUNE KABİ	NUMUNE MİKTARI	TAŞIMA	SAKLAMA	KAYIT	
İDRAR KÜLTÜRÜ	İdrar	Steril Materyal kabı	5 cc	4 C de	4-8 c de 2 saat	HBYS	Nonsteril Kaba ,İdrar torbasından veya katater ucundan alınmış barkodsuz veya yanlış barkodlu ,dışkı ile karışmış ,Zaman aşımli örnek
GAİTA KÜLTÜRÜ	Gaita	Gaita kabı		4 C de	4-8 c de 2 saat	HBYS	Materyal bulaşmış kap,kontamine,nonsteril şartlarda gelen ,barkodsuz veya yanlış barkodlu zaman aşımli örnek
HEMAKÜLTÜR(KAN KÜLTÜRÜ)	TAM KAN	Kan kültürü şişesi	1/5 oranında	4 C de	4-8 c de 2 saat	HBYS	Barkodsuz veya yanlış barkodlu örnek
VAJİNAL KÜLTÜR	Vajen sürüntüsü	steril eküvyon çubuğu		4 C de	4-8 c de 2 saat	HBYS	Steril Olmayan Tüp ve Eküvyon Kullanımı,Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu ,Zaman Aşımli Örnek
YARA KÜLTÜRÜ	Yara Sürüntüsü	Steril Eküvyon çubuğu		4 C de	4-8 C de 2 saat	HBYS	Steril Olmayan Tüp ve Eküvyon Kullanımı,Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu ,Zaman Aşımli Örnek
KULAK KÜLTÜRÜ	Kulak salgısı	Steril Eküvyon çubuğu		4 C de	4-8 C de 2 saat	HBYS	Steril Olmayan Tüp ve Eküvyon Kullanımı,Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu ,Zaman Aşımli Örnek



LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

Dokuman No:	BIY.LS.03
Yayın Tarihi:	10.04.2010
Rev.No:	01
Rev.Tarihi:	20.09.2013
Sayfa No:	19/17

TEST ADI	NUMUNE	KABUL KRİTERLERİ					RED KRİTERLERİ
		NUMUNE KABI	NUMUNE MİKTARI	TAŞIMA	SAKLAMA	KAYIT	
BURUN KÜLTÜRÜ	Burun sürüntüsü	Steril Eküvyon çubuğu		4 C de	4-8 C de 2 saat	HBYS	Steril Olmayan Tüp ve Eküvyon Kullanımı,Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu ,Zaman Aşımli Örnek
STERİL VÜCUT SIVILARI KÜLTÜRÜ	(Periton,BO S Plevra,vb)	Steril Materyal kabı		4 C de	4-8 C de 2 saat	HBYS	Steril Olmayan Tüp ve Eküvyon Kullanımı,Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu ,Zaman Aşımli Örnek
SPERM KÜLTÜRÜ	Meni	Steril Materyal kabı		4 C de	4-8 C de 2 Saat	HBYS	Steril Olmayan Tüp ve Eküvyon Kullanımı,Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu ,Zaman Aşımli Örnek
GRAM BOYAMA	Muhtelif vücut sıvıları	Steril Materyal kabı/cubugu		25 C de	25 C de 72 saat	HBYS	Steril Olmayan Tüp ve Eküvyon Kullanımı,Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu ,Zaman Aşımli Örnek
DİREK MİKROSKOPİK İNCELENME	İdrar/gaita vb.	NUMUNE KABI		25 C de	4-8 C de 2 saat	HBYS	Yetersiz ,uzun süre beklemiş örnek,kontamine toplama kabı barkodsuz veya yanlış barkodlu örnek
MANTAR ARANMASI VE KÜLTÜRÜ	Kazıntı	Boş petri		25 C de	25 C de	HBYS	Barkodsuz veya Yanlış barkodlu ,zaman aşımli örnek



LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

Dokuman No:	BIY.LS.03
Yayın Tarihi:	10.04.2010
Rev.No:	01
Rev.Tarihi:	20.09.2013
Sayfa No:	19/18

TEST ADI	NUMUNE	KABUL KRİTERLERİ					RED KRİTERLERİ
		NUMUNE KABI	NUMUNE MİKTARI	TAŞIMA	SAKLAMA	KAYIT	
NAZOFARENKS KÜLTÜRÜ	Farenks sürüntü	Steril Eküvyon çubuğu		25 C de	4-8 C de 2 saat	HBYS	Steril Olmayan Tüp ve Eküvyon Kullanımı,Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu ,Zaman Aşımli Örnek
ÜRETRAL AKINTI KÜLTÜRÜ	Akıntı kültürü	Steril Eküvyon çubuğu		25 C de	4-8 C de 2 saat	HBYS	Steril Olmayan Tüp ve Eküvyon Kullanımı,Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu ,Zaman Aşımli Örnek
GMT(GAİTA MİKROSKOBİSİ)	Gaita	NUMUNE KABI		25 C de	4-8 C de 2 saat	HBYS	Materyal bulaşmış kap,kontamine,nonsteril şartlarda gelen ,barkodsuz veya yanlış barkodlu zaman aşımli örnek
GGK(GAİTADA GİZLİ KAN-hhb)	Gaita	NUMUNE KABI		25 C de	4-8 C de 2 saat	HBYS	Materyal bulaşmış kap,kontamine,nonsteril şartlarda gelen ,barkodsuz veya yanlış barkodlu zaman aşımli örnek
GAİTADA PARAZİT(GPY)	Gaita	NUMUNE KABI		25 C de	4-8 C de 2 saat	HBYS	Materyal bulaşmış kap,kontamine,nonsteril şartlarda gelen ,barkodsuz veya yanlış barkodlu zaman aşımli örnek
GAİTA (TAM ANALİZ TETKİKİ)	Gaita	NUMUNE KABI		25 C de	4-8 C de 2 saat	HBYS	Materyal bulaşmış kap,kontamine,nonsteril şartlarda gelen ,barkodsuz veya yanlış barkodlu zaman aşımli örnek



LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

Dokuman No:	BIY.LS.03
Yayın Tarihi:	10.04.2010
Rev.No:	01
Rev.Tarihi:	20.09.2013
Sayfa No:	19/19

TEST ADI	NUMUNE	KABUL KRİTERLERİ					RED KRİTERLERİ
		NUMUNE KABI	NUMUNE MİKTARI	TAŞIMA	SAKLAMA	KAYIT	
ROTA VİRUS ANTİJENİ	Gaita	NUMUNE KABI		25 C de	4-8 C de 2 saat	HBYS	Materyal bulaşmış kap,kontamine,nonsteril şartlarda gelen ,barkodsuz veya yanlış barkodlu zaman aşımli örnek
ROTAVİRUS +ADENOVİRUS Ağ	Gaita	NUMUNE KABI		25 C de	4-8 C de 2 saat	HBYS	Materyal bulaşmış kap,kontamine,nonsteril şartlarda gelen ,barkodsuz veya yanlış barkodlu zaman aşımli örnek
TRICHOMONAS ARAMASI	İdrar vag.sürüntü sü	Steril Eküvyon çubuğu/steril kap		25 C de	25 C de	HBYS	Barkodsuz veya Yanlış barkodlu ,zaman aşımli örnek
DIŞKI SİNDİRİM	Gaita	NUMUNE KABI		25 C de	25 C de	HBYS	Materyal bulaşmış kap,kontamine,nonsteril şartlarda gelen ,barkodsuz veya yanlış barkodlu zaman aşımli örnek
SELOFANLI LAM	Gaita	Parafilmli Lam		25 C de	25 C de	HBYS	Materyal bulaşmış kap,kontamine,nonsteril şartlarda gelen ,barkodsuz veya yanlış barkodlu zaman aşımli örnek
SPERMİOGRAM	Meni	Steril materyal kabı		4 C de	4-8 C de 2 saat	HBYS	Steril olmayan kap kullanımı, barkodsuz veya yanlış barkodlu ,zaman aşımli örnek uygunsuz Perhiz