



KAPAK	TEST	ALINACAK TÜP
SARI KAPAK (SERUM JELLİ)	<ul style="list-style-type: none"> - RUTİN BİYOKİMYA (GLUKOZ, ÜRE, CRE, UA, AST(GOT), ALT(GPT), GGT, FOSFOR, TRİ, HDL, LDL, VLDL, LDH, ALP, MG, CA, NA, K, CL, CRP, DEMİR, DEMİR BAĞLAMA, TOTAL PROTEİN, ALBÜMİN, AMİLAZ, T.BİL. DİREKT BİL. FERRİTİN, FOLİK ASİT, VİT12, VİTD vb.) - GENEL HORMON (FT3, FT4, TSH, CEA, CEA15-3, CA 19-9, CA 125, İNSULİN, FPSA, TESTESTERON, HEMOSİSTEİN, 1,25VİTD, BİOTİN (VİTH), VALPROİK ASİT, FSH, LH, PROLAKTİN, E2 (ESTRADİOL) vb.) - SEROLOJİ TESTLERİ (HBSAG, HCV, HIV, ANTİ HBS, RUBELLA vb.) - CK, CK-MB 	
MOR TÜP (EDTA'LI)	<ul style="list-style-type: none"> - TAM KAN - PERİFERİK YAYMA - KAN GRUBU - CROSS MATCH - DİREKT COOMBS 	
MAVİ KAPAKLI (SİTRAT'Lı)	<ul style="list-style-type: none"> - APTT - PROTROMBİN - D-DİMER - FİBRİNOJEN 	
SİYAH KAPAKLI (HEPARİN)	- SEDİMENTASYON	
YEŞİL KAPAKLI (HEPARİN)	<ul style="list-style-type: none"> - PRO-BNP - TROPONİN-T 	
LACİVERT KAPAKLI (ESER ELEMENT)	<ul style="list-style-type: none"> - ÇINKO - BAKIR - KURŞUN - CİVA VE TOKSİKOLOJİ 	

*Alınan mor tüp, sitrat mavı kapaklı tüp, esr tüpü yavaşça alt üst edilmesi önemlidir.

NOT: Kanama, pihtlaşma zamanı olan testler manuel olarak parmaktan bakılmaktadır.

KÜLTÜR (JELİ / JELİZİ SWAP+ ÇUBUK)	<ul style="list-style-type: none"> - JELİZİ SWAP (Üroplasma / Mycoplasma , Chlamydia) - JELİ SWAP (Kültür antibiyogram, yara kültürü, abse kültürü vb.) (*abse kültürü sıvı enjektöre alınmış ise o şekilde gönderilir) (** Sonda ile alınan idrarlar üstüne; sonda ile alındığı belirtilmelidir) (*** alınan her kültür örneğinin üstüne alındığı bölge yazılmalıdır) *Kan Kültürü şişeleri sadece aerop şişe kullanılıyor, Pediatric kan kültür şişesi ayrı - BALGAM KÜLTÜRÜ (Steril idrar kabına alınabilir. Tükürksüz vermesi önemli) - BOĞAZ KÜLTÜRÜ (Jelli swap ile hastanın ağızının tamamen açılması ve dilinin dışarı çıkartması istenir, dile ve ağız içine swap dokunulmadan tonsillalara değdirilerek kültür örneği alınıp jelli swapa konulup barkod yapıştırılır) - İNFLUENZA A/B ÖRNEK ALIMI: Laboratuvardan özel influenza çubuğu alınmalı, ubuk ile iki burun deligidenden nazofarinkse kadar ilerletip örnek alınmalı, steril idrar kabına konup gönderilmeli) 	
------------------------------------	--	--